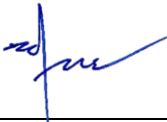


	PEMERIKSAAN TYPHOID ANTIGEN DENGAN METODE <i>RAPID TEST</i>		
	SOP	No.Dok : 193/SOP/PUSK.SR/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit:20 Januari 2023	
		Halaman : 1/3	
Puskesmas Sungai Radak			<u>Ngadiono, S. Kep., Ners</u> 19731118 199501 1 001
1. Pengertian	Pemeriksaan Thypoid Ag adalah pemeriksaan Laboratorium dengan bahan pemeriksaan berupa serum/plasma yang bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya antigen spesifik untuk Salmonella thipoid		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan Pemeriksaan Salmonella thipoid di Puskesmas		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Sungai Radak No. Tahun tentang pemeriksaan laboratorium		
4. Referensi	1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Rekam Medis. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 8. Buku juknis pelayanan Puskesmas pada masa pandemi Covid-19 9. Manual Petunjuk Pemeriksaan Anti Thypoid Ag		
5. Prosedur/Langkah-langkah	1) Alat dan bahan yang diperlukan: a) Masker b) Sarung tangan medis c) Sampel darah d) Rapid Tes Thypoid Ag e) Kapas Alkohol f) Blod lancet 2) Petugas yang melaksanakan : a) Petugas Laboratorium 3) Langkah-langkah: a) Petugas mempersilahkan pasien masuk ruang laboratorium b) Petugas menyiapkan sampel serum atau plasma dalam tabung c) Petugas memasukkan strip Thipoid Ag rapid Test sampai batas tanda ke dalam serum atau plasma kurang lebih 10 detik kemudian mengangkatnya d) Petugas mendiamkan strip test pada posisi rata atau datar dengan menaruh bagian test di atas		

	e) Petugas membaca garis tanda pada test strip dala waktu 15 menit,dengan inteprtasi hasil pemeriksaannya adalah: f) -Negatif:terbentuk 1 garis berwarna pada zona garis control g) -Positif:terbentuk 2 garis berwarna pada zona garis control dan zona garis test h) Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan
6. Bagan Alir/Diagram Alir	<pre>graph TD; A([Petugas menggunakan APD sesuai standar.]) --> B[Petugas mempersilahkan pasien masuk ruang laboratorium]; B --> C[Petugas menerima blanko lembar permintaan pemeriksaan]; C --> D[Petugas mencocokan identitas yang tertera pada blanko]; D --> E[Petugas memberitahu prosedur, maksud, dan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan]; E --> F[Petugas menulis identitas dan permintaan pemeriksa lab pada buku register lab]; F --> G[Petugas mempersiapkan alat dan bahan]; F --> H[Petugas menyiapkan sampel serum atau plasma dalam tabung]; G --> I[Petugas memasukkan strip Thipoid Ag rapid Test sampai batas tanda ke dalam serum atau plasma kurang lebih 10 detik kemudian]; H --> I; I --> J[Petugas mendiamkan strip test pada posisi rata atau datar dengan menaruh bagian test di atas]; J --> K[Petugas membaca garis tanda pada test strip dala waktu 15 menit,dengan inteprtasi hasil pemeriksaannya]; K --> L[Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan]; L --> M([Petugas mencuci tangan dan melepaskan APD sesuai protokol kesehatan.]);</pre>
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	a) Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai dengan level masing- masing ruangan dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan b) Selama kegiatan, petugas wajib melaksanakan Protokol Kesehatan c) Kerahasiaan rekam medis harus tetap terjaga d) Unit pemeriksaan yang dituju harus dipastikan kembali dengan benar sebelum menyerahkan rekam medis.

8. Unit terkait	- Ruang UGD - Poli Umum			
9. Dokumen Terkait	☐ Register laboratorium ☐ Blangko permintaan pemeriksaan lab ☐ Blanko hasil pemeriksaan lab			
10. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku
	1.	Referensi	1. Permenkes No.43 tahun 2019 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 4. Buku juknis pelayanan Puskesmas pada masa pandemi Covid-19	3 Agustus 2020
	2.	Langkah-langkah	- Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan - Petugas melepas APD sesuai protocol kesehatan	3 Agustus 2020
	3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan	3 Agustus 2020
	4.	Kepala puskesmas	<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP. 19731118 199501 1 001	20 Januari 2023
	5.	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Sungai Radak No. 061 Tahun 2023tentang Jenis-jenis Pelayanan Laboratorium	20 Januari 2023